

**JAMBIÈRE ZAMST LC-1
NOTICE D'UTILISATION**

Veillez lire la présente notice dans son intégralité avant d'utiliser le produit.

Domaine d'application : Support de la jambe

*Ce produit n'est pas destiné à un usage médical.

*Bien que ce produit soit conçu pour soutenir la jambe, il ne peut pas la protéger de toutes les blessures.

N'utilisez pas ce produit dans les cas suivants :

- En cas de problèmes circulatoires (par ex., hypertension) ou de maladies cardiovasculaires, car il peut y avoir une aggravation des symptômes.
- En cas de problème au pied ou à la jambe, tel que désordre du système nerveux ou diabète, car il peut y avoir une aggravation des symptômes.
- En présence de conditions anormales dans la zone d'utilisation du produit, par exemple coupures, fractures, engourdissement, œdème ou éruption cutanée.

Mesures de précaution :

- En cas de sensation douloureuse, d'œdème, d'irritation de la peau, d'inconfort ou de toute autre réaction anormale, arrêtez d'utiliser le produit et consultez un médecin.
- Si vous avez une peau sensible ou des allergies, le produit peut provoquer une éruption cutanée ou des réactions allergiques. Dans ce cas, arrêtez toute utilisation de celui-ci et consultez un médecin.
- N'utilisez pas le produit pendant votre sommeil. Un changement inapproprié de la position du produit ou une utilisation prolongée de celui-ci pendant le sommeil peut gêner la circulation sanguine.
- Vérifiez que le produit ne forme pas de plis ou de surépaisseurs pendant son utilisation, car cela risque de gêner la circulation sanguine.
- Portez le produit directement sur la jambe et non par-dessus une chaussette, car cela risque de gêner la circulation sanguine.
- Si le produit est endommagé ou usé, ou si la fermeture à velcro est inopérante, n'utilisez pas le produit.
- Vérifiez que vous utilisez la bonne taille. (Consultez le tableau des tailles sur l'emballage et l'étiquette de taille située à l'intérieur du produit.)
- Si le produit change de position ou devient trop lâche, remettez-le en place en suivant toute la procédure présentée dans la section « Mise en place » de cette notice.
- Vous ne devez pas modifier ni réparer le produit car il risque de perdre son efficacité et/ou de provoquer des blessures.

Mesures de préservation du produit :

- Le produit peut se décolorer sous l'action de la transpiration ou d'autres liquides. Il peut déteindre sur les vêtements portés dessous ou à proximité.

Mise en place :

*Les illustrations présentent la mise en place sur la jambe droite.

1. Repliez la jambièrre entre les doigts et enfiler-la sur les orteils. (Illustration 1)
2. Tirez la jambièrre vers le haut avec les deux mains. Positionnez le bord inférieur de la jambièrre au niveau de la cheville (A). (Illustration 2)
3. Dépliez progressivement la jambièrre vers le haut. Vérifiez qu'elle ne forme pas de plis ou de surépaisseurs, et qu'elle est dépliée uniformément. (Illustration 3)
4. Le produit est fixé correctement.

*Si vous souhaitez porter des chaussettes, faites-le par-dessus la jambièrre.

Niveau de compression :

Au point B (cheville) : Environ 30 hPa (22,50 mm Hg)

Au point C (jambe) : Environ 21 hPa (15,75 mm Hg)

Entretien :

- Lavez le produit à la main avec un détergent doux et laissez-le sécher à l'air libre.
- Ne placez pas le produit dans un sèche-linge. Ne le lavez pas à sec et ne le repassez pas. N'utilisez pas de détergents contenant du chlore, notamment des agents de blanchiment. Ceux-ci peuvent endommager le produit.
- Le produit peut déteindre. Ne le lavez pas avec des textiles blancs ou de couleur.

Composition : Polyuréthane et nylon

