

PROTÈGE-POUCE ZAMST NOTICE D'UTILISATION

Veillez lire la présente notice dans son intégralité avant d'utiliser le produit.

Domaine d'application : Protection et immobilisation du pouce

*Ce produit n'est pas destiné à un usage médical.

*Bien que ce produit soit conçu pour soutenir le pouce, il ne peut pas le protéger de toutes les blessures.

N'utilisez pas ce produit dans les cas suivants :

- En présence de conditions anormales dans la zone d'utilisation du produit, par exemple coupures, fractures, engourdissement, œdème ou éruption cutanée.

Mesures de précaution :

- En cas de sensation douloureuse, d'œdème, d'irritation de la peau, d'inconfort ou de toute autre réaction anormale, arrêtez d'utiliser le produit et consultez un médecin.

- Si vous avez une peau sensible ou des allergies, le produit peut provoquer une éruption cutanée ou des réactions allergiques. Dans ce cas, arrêtez toute utilisation de celui-ci et consultez un médecin.

- N'utilisez pas le produit pendant votre sommeil. Un changement inapproprié de la position du produit ou une utilisation prolongée de celui-ci pendant le sommeil peut gêner la circulation sanguine.

- Une compression prolongée de la zone corporelle peut avoir une incidence négative sur la circulation sanguine ou provoquer une gêne. Pour éviter ces situations, il est conseillé de retirer et remettre en place le produit à intervalles réguliers.

- Si le produit est endommagé ou usé, ou si la fermeture à velcro est inopérante, n'utilisez pas le produit.

- Vérifiez que vous utilisez la bonne taille. (Consultez le tableau des tailles sur l'emballage et l'étiquette de taille située à l'intérieur du produit.)

- Ne serrez pas excessivement la bande et n'exercez pas une compression trop forte.

- Si le produit change de position ou devient trop lâche, remettez-le en place en suivant toute la procédure présentée dans la section « Mise en place » de cette notice.

- Effectuez uniquement les ajustements décrits dans cette notice. Ne procédez à aucune autre modification ou réparation. car il risque de perdre son efficacité et/ou de provoquer des blessures.

- En cas d'utilisation du produit par un enfant, un adulte doit impérativement effectuer les ajustements décrits dans cette notice avant le premier usage.

- Faites attention aux risques de brûlure en cas d'utilisation d'eau chaude.

- Après avoir plongé le produit dans de l'eau chaude, veillez à éliminer l'excédent d'eau avec une serviette et vérifiez que le produit n'est pas trop chaud avant de l'appliquer sur la main.

Mesures de préservation du produit :

- Le produit peut se décolorer sous l'action de la transpiration ou d'autres liquides. Il peut déteindre sur les vêtements portés dessous ou à proximité.

- Vérifiez que les fermetures à velcro ne sont pas en contact avec la matière du produit car elles peuvent l'endommager.

Ajustement et mise en place :

*Les illustrations présentent la mise en place sur la main droite. Ce produit n'est pas conçu spécifiquement pour la main droite ou la main gauche. Sa mise en place est identique des deux côtés.

1. Préparez une serviette pour éliminer l'excédent d'eau et un récipient (par ex., un bol) pouvant contenir de l'eau chaude et suffisamment grand pour le produit. (Illustration 1)
2. Versez de l'eau chaude (à environ 70°C) dans le récipient. (Illustration 2)
3. Ouvrez toutes les fermetures à velcro. Saisissez les deux fermetures par le bout des doigts. (Illustration 3)
4. Plongez la partie principale du produit dans l'eau chaude pendant 15 à 20 secondes. Faites attention de ne pas vous brûler. (Illustration 4)
5. Retirez le produit de l'eau chaude et épongez l'excédent d'eau avec la serviette. (Illustration 5)
6. Vérifiez que le produit n'est pas trop chaud. Pliez la partie principale du produit par la moitié dans le sens de la longueur. (Illustration 6)
7. Passez le pouce dans la boucle (A) et immobilisez-le dans la position souhaitée en donnant au produit la forme appropriée. (Illustration 7)
8. Attachez la bande de poignet (B). (Illustration 8)
9. Attachez la bande de pouce (C). (Illustration 9)
10. Placez votre autre main sur le produit afin d'ajuster ce dernier confortablement à la forme du doigt et de la main. Maintenez la position jusqu'à ce que le produit se rigidifie. (Illustration 10) La rigidification intervient trois à quatre minutes après la sortie de l'eau chaude. Pour un durcissement plus rapide, plongez le produit dans de l'eau froide.

*Si vous avez déjà ajusté le produit avant la première utilisation, effectuez uniquement les étapes 7 à 9.

*Si la partie principale du protège-pouce se déforme pendant l'utilisation, un réajustement est possible. Le produit peut être ajusté une vingtaine de fois.

Entretien :

- Lavez le produit à la main avec un détergent doux et laissez-le sécher à l'air libre.

- Ne placez pas le produit dans un sèche-linge. Ne le lavez pas à sec et ne le repassez pas. N'utilisez pas de détergents contenant du chlore, notamment des agents de blanchiment. Ceux-ci peuvent endommager le produit.

- Le produit peut déteindre. Ne le lavez pas avec des textiles blancs ou de couleur.

Composition : Nylon, polyester, polyuréthane et mousse isoprène

